


③ 分解・洗浄




- ☐ お薬が薬液槽のなかに残っていませんか？
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか？

ハンドセットを分解する

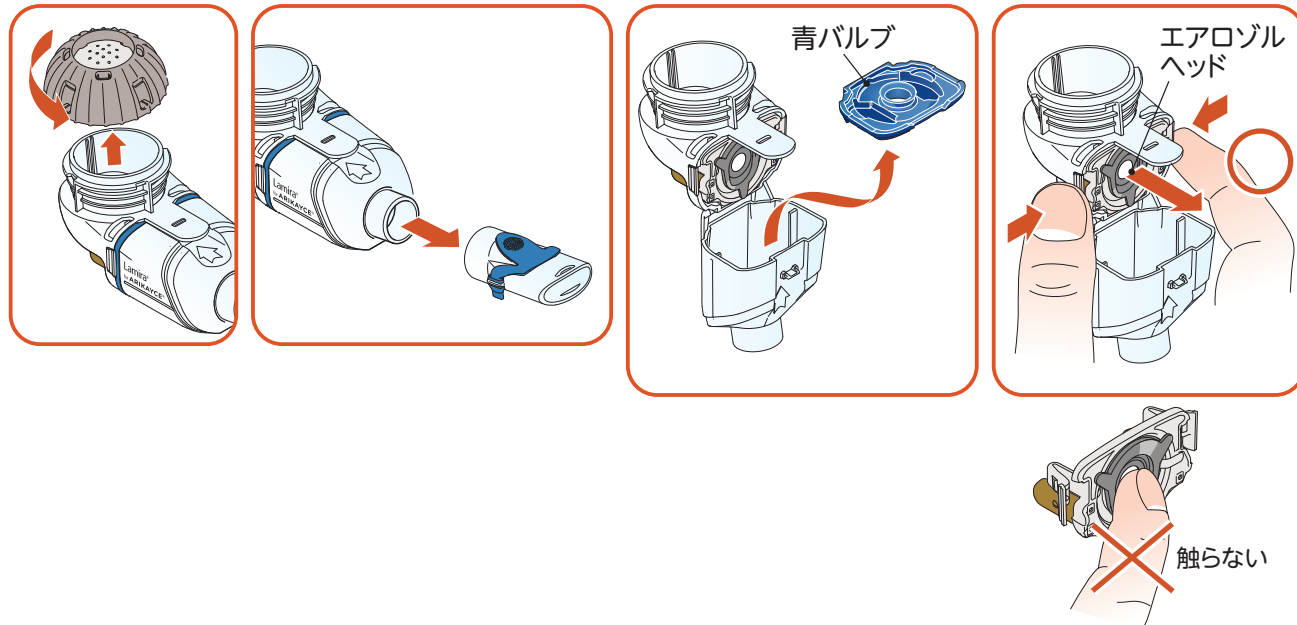


* 塩素系あるいは酵素系の漂白剤、アルコールを含んだ除菌剤は使わないでください

部品についているお薬を拭き取り、洗浄する

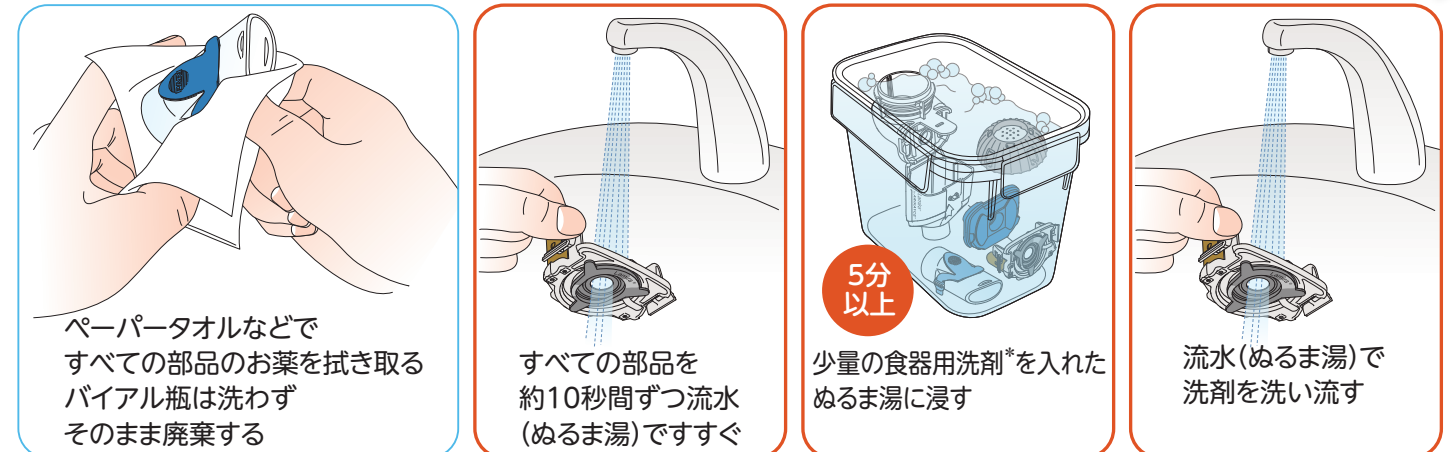


週に1回行う

エアロゾルヘッドは、1週間に1回、超音波クリーナーで洗浄する

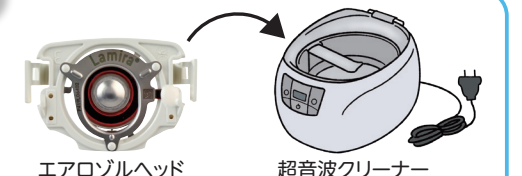

- ☐ 消毒のための道具は揃っていますか？
- ☐ 消毒に必要な時間を確認しましたか？


消毒する

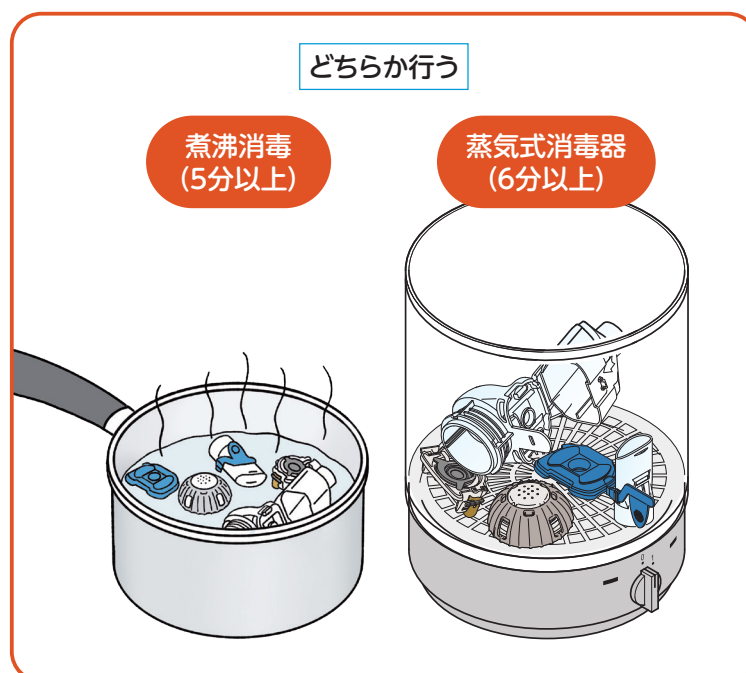

- 煮沸消毒には、蒸留水あるいは、精製水(日本薬局方と記載のあるもの)を使用する
- 蒸気式消毒器は、水道水を使用する

乾燥して保管

終了

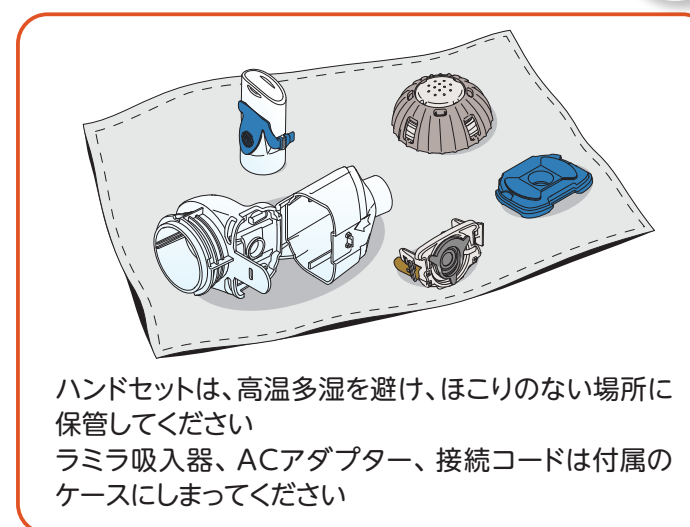

ハンドセットは、高温多湿を避け、ほこりのない場所に保管してください
ラミラ吸入器、ACアダプター、接続コードは付属のケースにしまってください

ハンドセットは、1ヵ月ごとに交換します

新しいハンドセットを使用するときには、オレンジ枠にしたがって
洗浄と消毒を行います









Insmed®, Insmed logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated. PARI® is a registered trademark of PARI GmbH. Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH. All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

① 器具の準備(組み立て)




- ☐ 手を洗いましたか?
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか?


ハンドセットを組み立てる

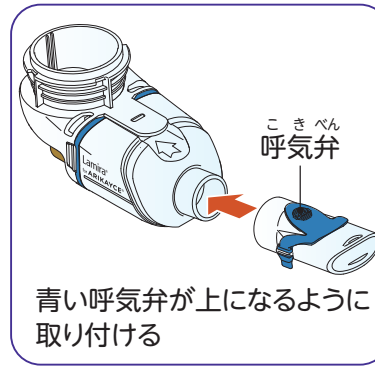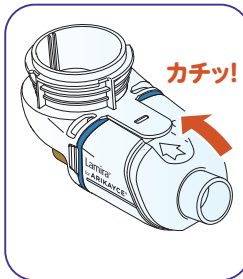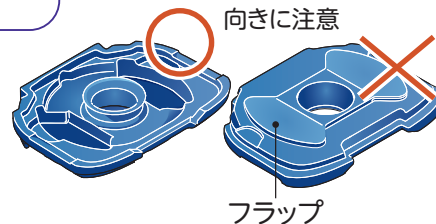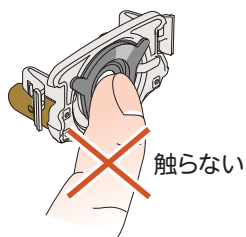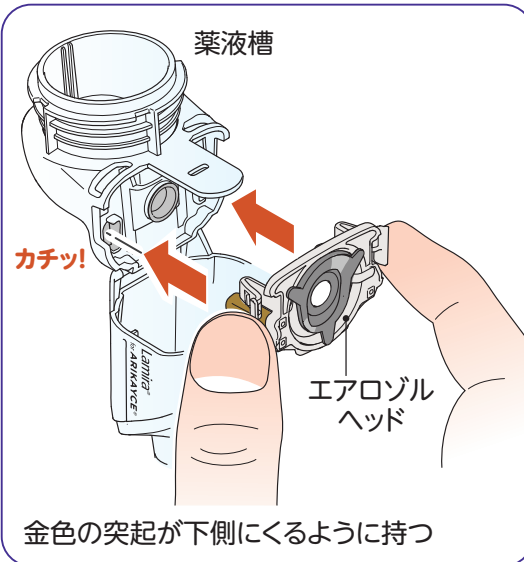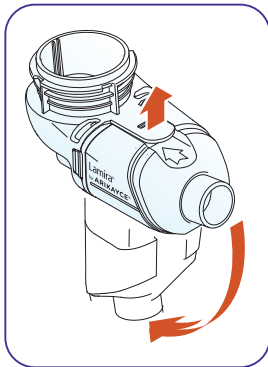

組み立て完了

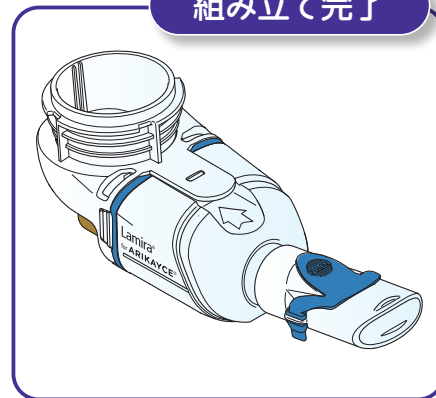

接続コードを取り付け、ラミラ吸入器と接続する




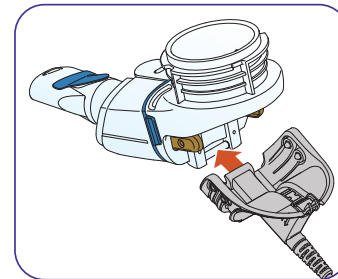


接続完了




- ☐ お薬は室温に戻っていますか?(吸入する45分以上前に冷蔵庫から出しておく)
- ☐ まわりにヒーター、ストーブ、可燃性のガスなどはありませんか?

バイアル瓶を開けて薬を入れる

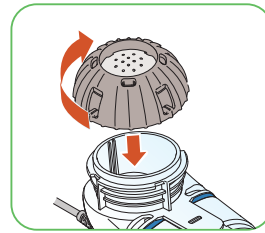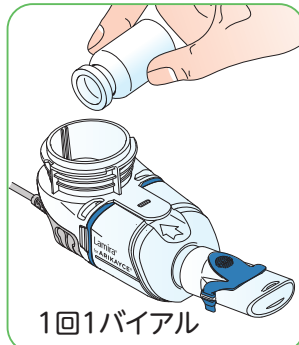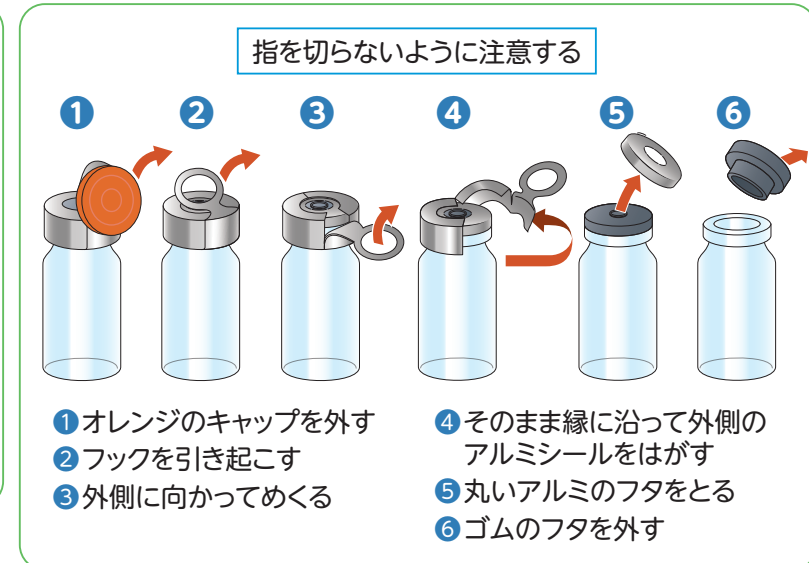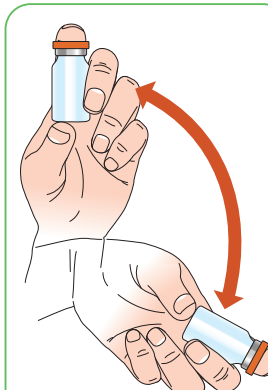


お薬の準備完了

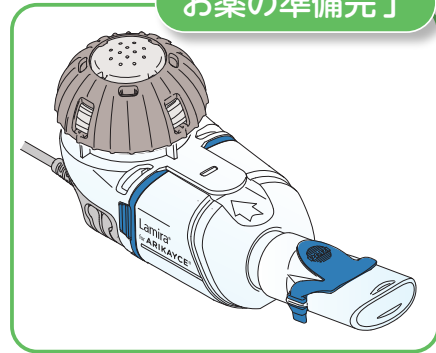

吸入する



吸入開始のマーク

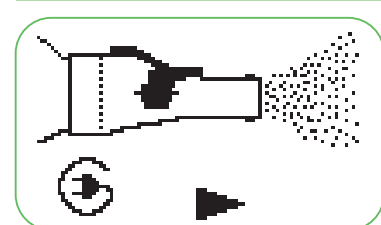

約14分間(最大20分間)で自動で止まる

