


## ③ 分解・洗浄



- ☐ お薬が薬液槽のなかに残っていませんか？
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか？

### ハンドセットを分解する

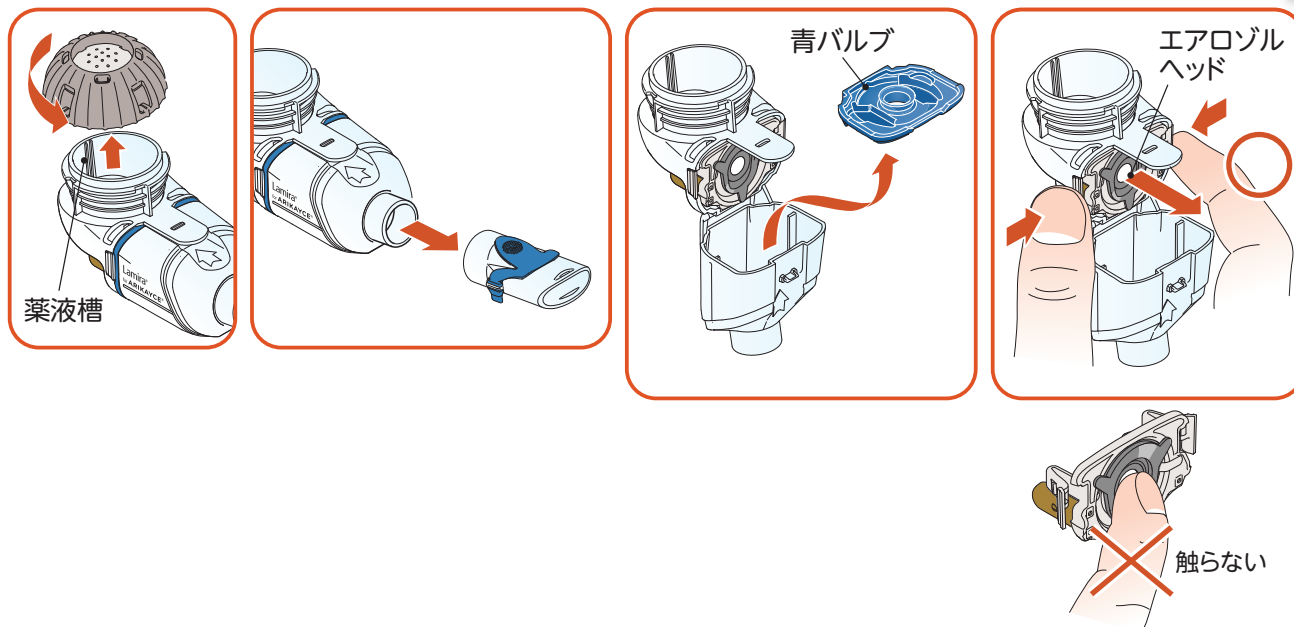

### 部品についているお薬を拭き取り、洗浄する

\* 粉末状、クリーム状、白濁している洗剤は使わないでください



#### 週に1回行う

エアロゾルヘッドは、1週間に1回、超音波クリーナーで洗浄する



超音波クリーナー

洗浄が終わったら、ぬるま湯でエアロゾルヘッドをすすぐ



- ☐ 消毒のための道具は揃っていますか？
- ☐ 消毒に必要な時間を確認しましたか？

### 消毒する



- 蒸気式消毒器は、水道水(80mL)を使用する
- 煮沸消毒には、蒸留水あるいは、精製水(日本薬局方と記載のあるもの)を使用する

### 乾燥して保管

終了



ハンドセットは、1ヵ月ごとに交換します

新しいハンドセットを使用するときには、オレンジ枠にしたがって洗浄と消毒を行います



アリケイス®の販売名はアリケイス®吸入液590mgです  
ラミラ®の販売名はラミラ®ネブライザシステムです

インスメッド合同会社  
東京都千代田区永田町二丁目10番3号  
東急キャピトルタワー13階  
https://insmed.jp

【問い合わせ先】  
メディカルインフォメーションセンター  
電話：0120-118808

Insmed®, Insmed logo, インスメッド® and アリケイス® are registered trademarks of Insmed Incorporated.  
PARI® is a registered trademark of PARI GmbH.  
Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH.  
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.







2024年6月作成  
PP-ARIK-JP-01017  
© 2024 Insmed GK. All Rights Reserved.  
© 2024 PARI GmbH. All Rights Reserved.

# ① 器具の準備(組み立て)




- ☐ 手を洗いましたか?
- ☐ 各部品に破損や変形はありませんか?


## ハンドセットを組み立てる

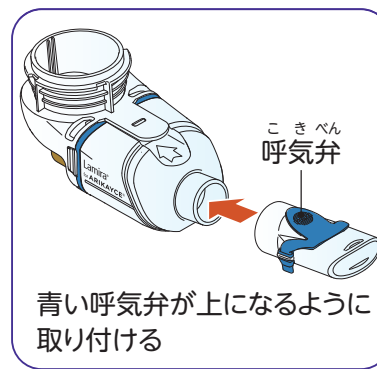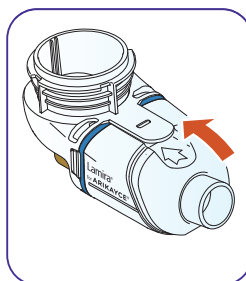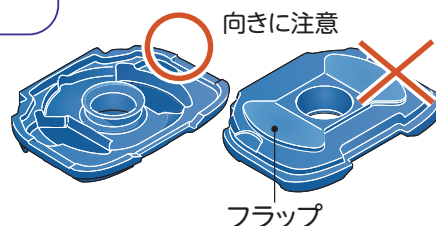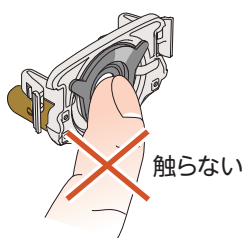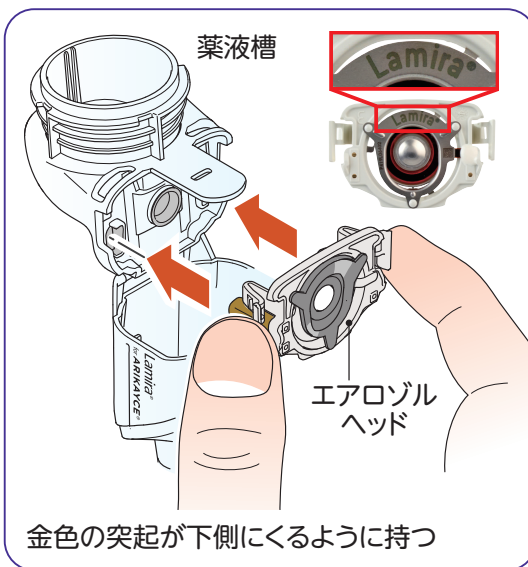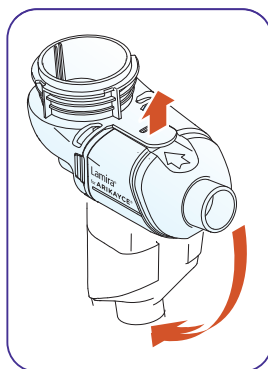


組み立て完了

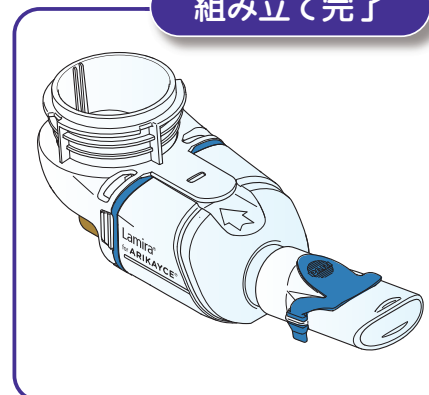

## 接続コードを取り付け、ラミラ吸入器と接続する

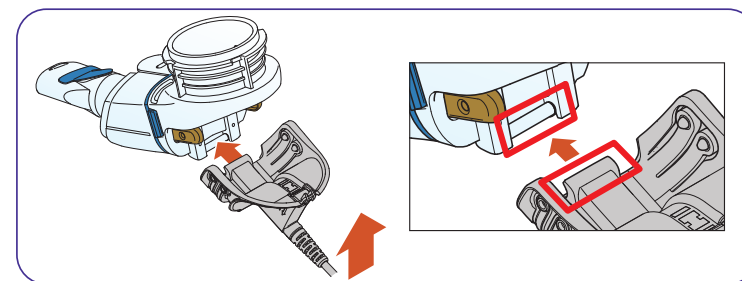


接続完了

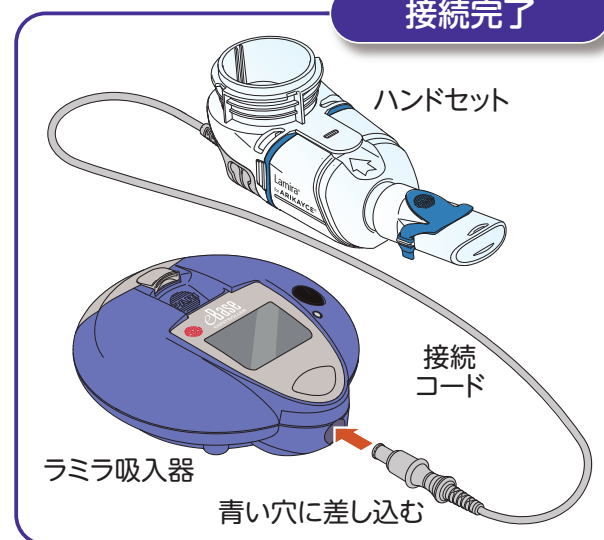


- ☐ お薬は室温に戻っていますか? **吸入する45分以上前に冷蔵庫から出しておく**
- ☐ まわりにヒーター、ストーブ、可燃性のガスなどはありませんか?



## バイアル瓶を開けてお薬を入れる

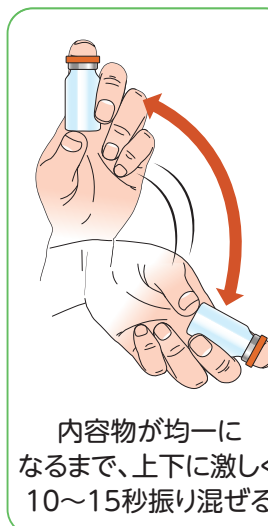


沈殿がある場合は、沈殿がなくなるまで振り混ぜてください

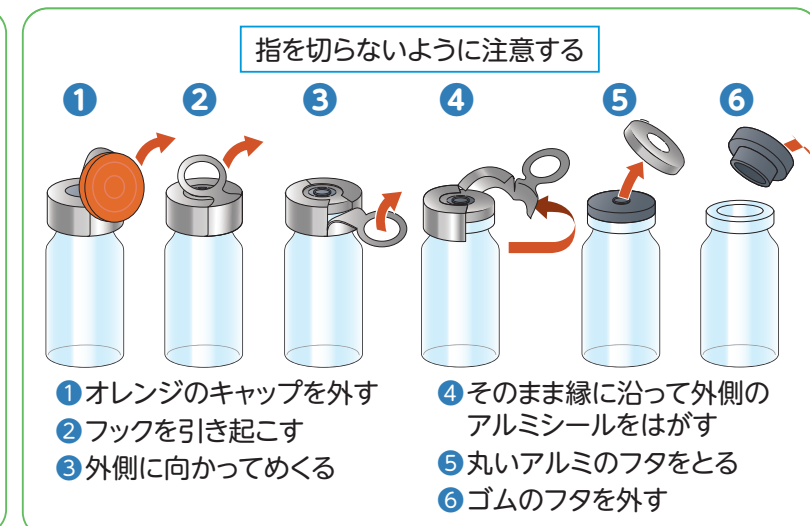


バイアルオープナーは、バイアル瓶のスムーズな開封を補助するものです。バイアルオープナーの使い方は「バイアルオープナー使い方ガイド」をご覧ください

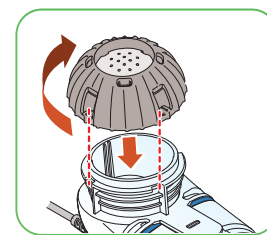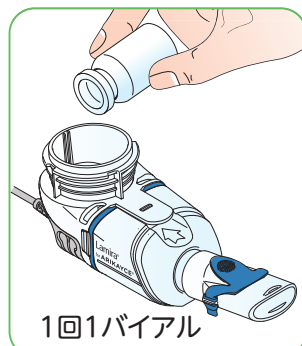


お薬の準備完了

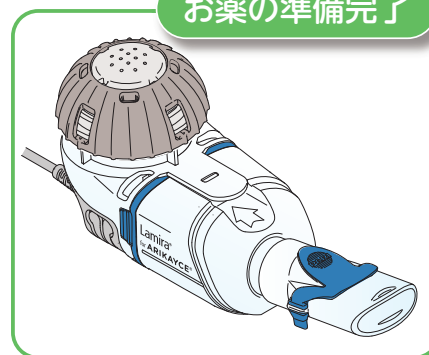

## 吸入する

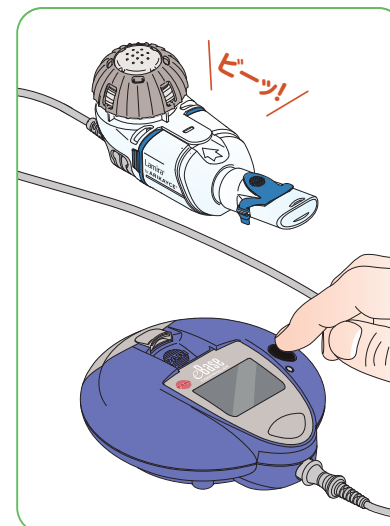

吸入開始のマーク

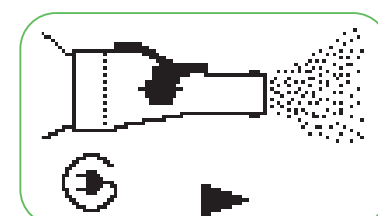

約14分間(最大20分間)で自動で止まる

