


アリケイス®による治療をする方へ

バイアルオープナー使い方ガイド

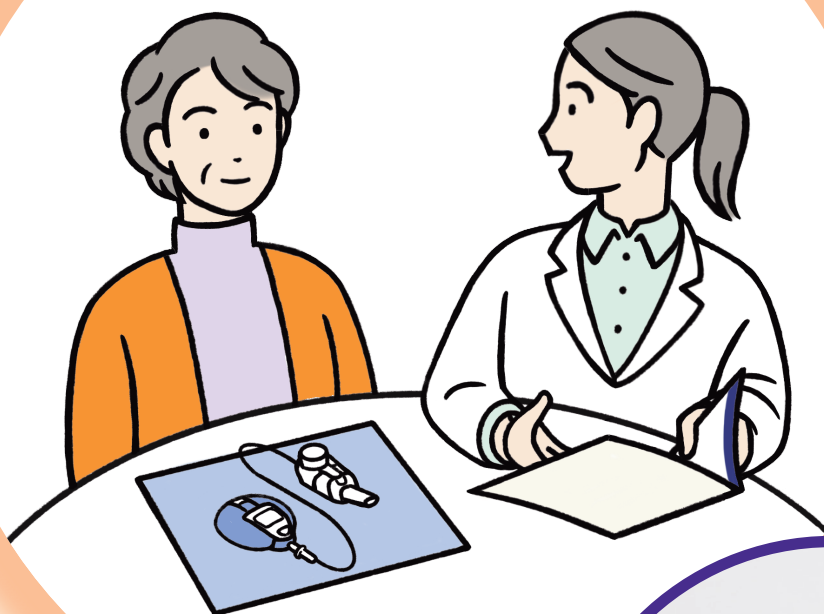


このバイアルオープナーは
アリケイスのスムーズな開封を補助するものです。
アリケイスの開封以外には使用しないでください。
またご使用の際、無理に力をかけるとオープナーが破損し、
けがにつながる恐れがあります。
使い方ガイドをよく読み、正しくお使いください。



はじめに

このバイアルオープナーの各突起には印が付いています。ご確認ください。

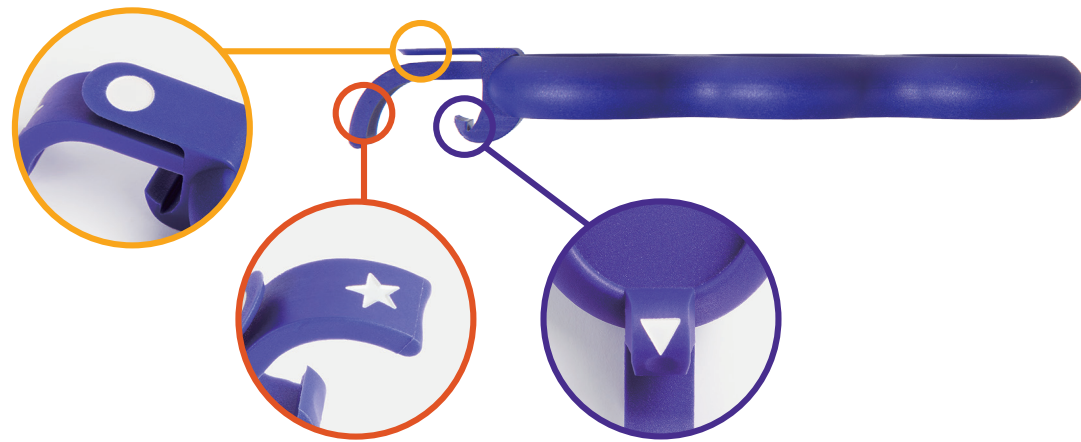

握るのが困難で、うまく力が入らない時は、穴に指を通すと力が入りやすくなります。




開封の手順

- 指を切らないよう注意してください
- 薬剤がこぼれないよう、バイアル瓶はしっかり固定してください
- 無理に力をかけると破損の恐れがありますのでご注意ください


オープナーの向き



バイアル瓶の開け方

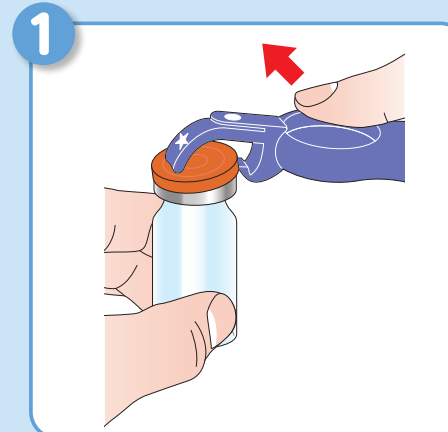


△をオレンジのキャップの下にあてて、栓抜きの要領でキャップを外す

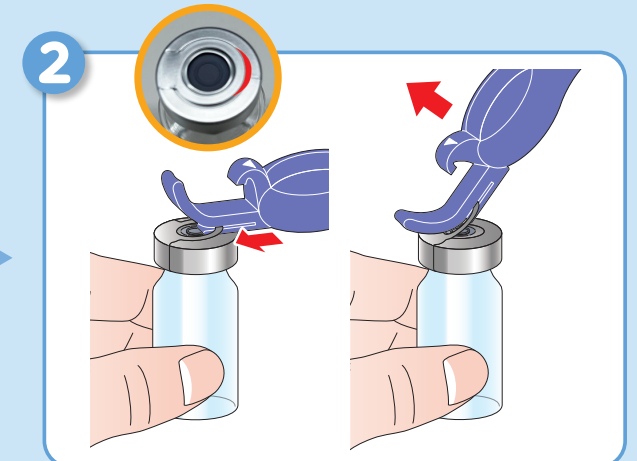

○をフックの輪っかの下に滑り込ませ、持ち手を引き上げ、フックを起こす


オープナーの向き

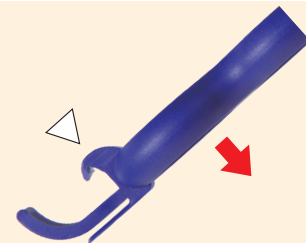


バイアル瓶の開け方



フックが手前に来るようにバイアル瓶を回転させ、△をフックに引っ掛ける
☆は瓶の側面にあてる

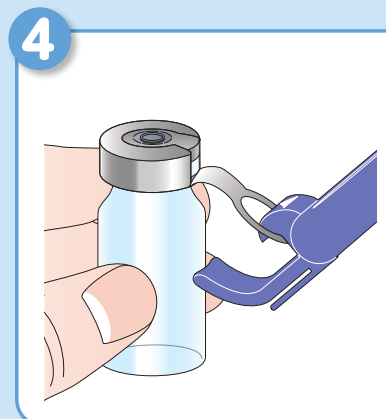


△をフックに引っ掛けたまま、☆を支点にしながら持ち手を外側に倒してフックを外す

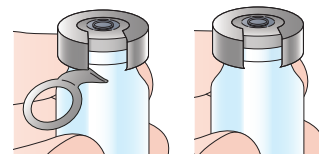

フックは外側のアルミシールについたままでも、すべてはがれてもどちらでも問題はありません




○をアルミシールの斜め下から差し込み、外側に向かって押し広げるようにアルミシールをはがす

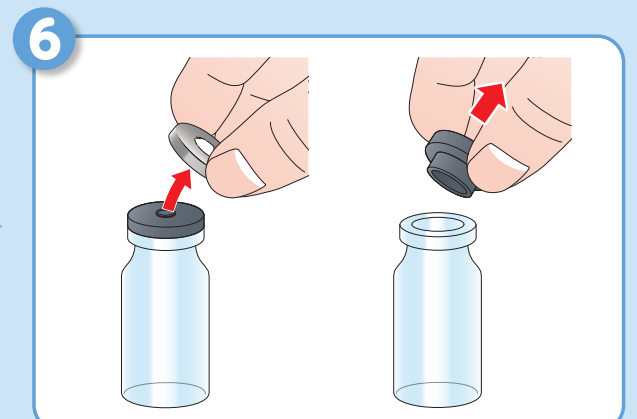

丸いアルミのフタとゴムのフタを指で取り外す

注意事項



- このバイアルオープナーは、アリケイス専用です。アリケイス以外のバイアル瓶の開封、およびその他の目的では使用しないでください。

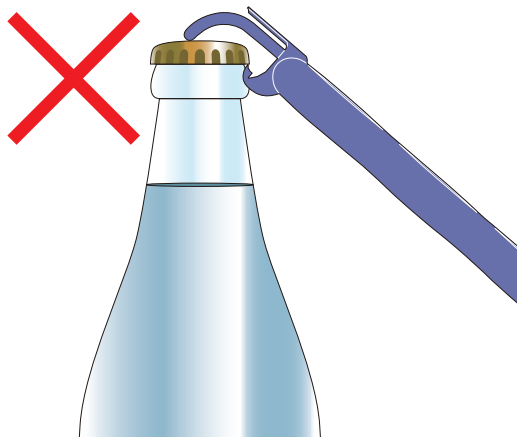

- バイアルオープナーをご使用後は、ラミラ®吸入器と同様に、洗浄・消毒をおこなってください。

煮沸消毒
(5分以上)

蒸気式消毒器
(6分以上)

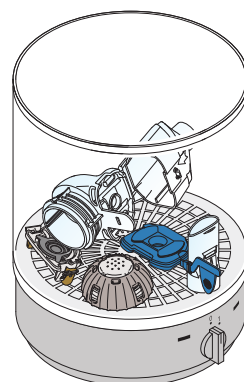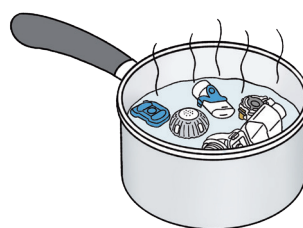

どちらか行う



アリケア サポート

ご不明な点や気になることは、
アリケア サポートにお電話ください

 **0120-384-600**

[朝8時～夜10時 365日]

アリケイスに関する情報やラミラ吸入器の
使い方に関しては、以下のホームページでも
ご確認ください



アリケイス吸入療法ののための

アリケア.net

<https://aricare.net>



Insméd®, Insméd logo, インスメッド®, ARIKAYCE® and アリケイス® are registered trademarks of Insméd Incorporated.
PARI® is a registered trademark of PARI GmbH. Lamira® and ラミラ® are registered trademarks of PARI Pharma GmbH.
All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.